


NEW Sharesource를 지금 만나보세요!

한글 버전 출시로 선호하는 언어를 선택하여 보다 쉽게 모니터링 할 수 있습니다.




언어 선택 방법


Main page에서 "Account Setting" 선택

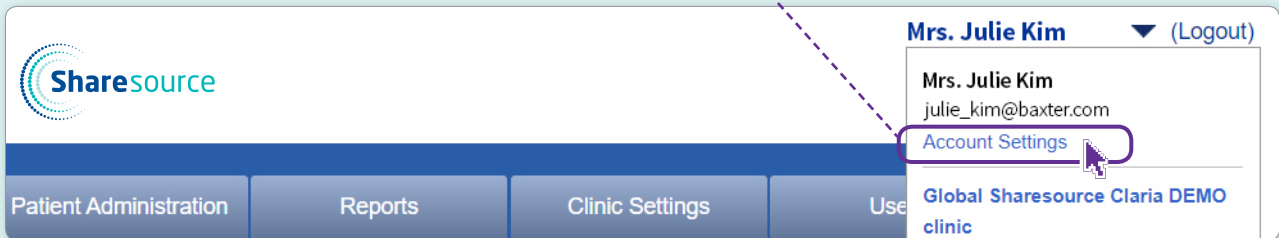

"Edit Preferences" 선택

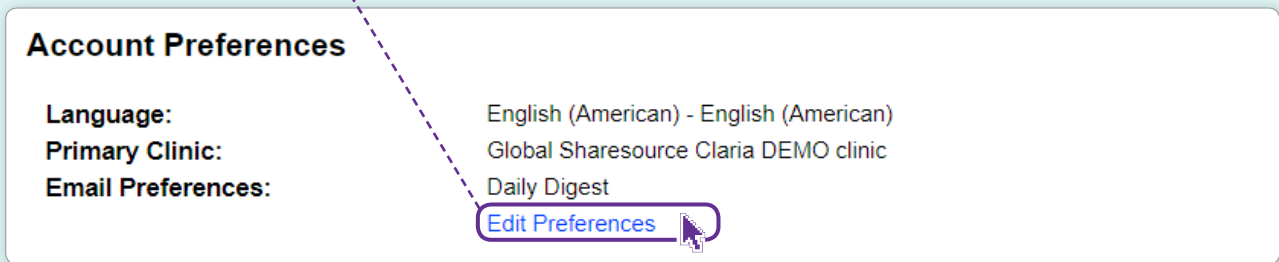

Language에서 "English" 또는 "한국어" 선택

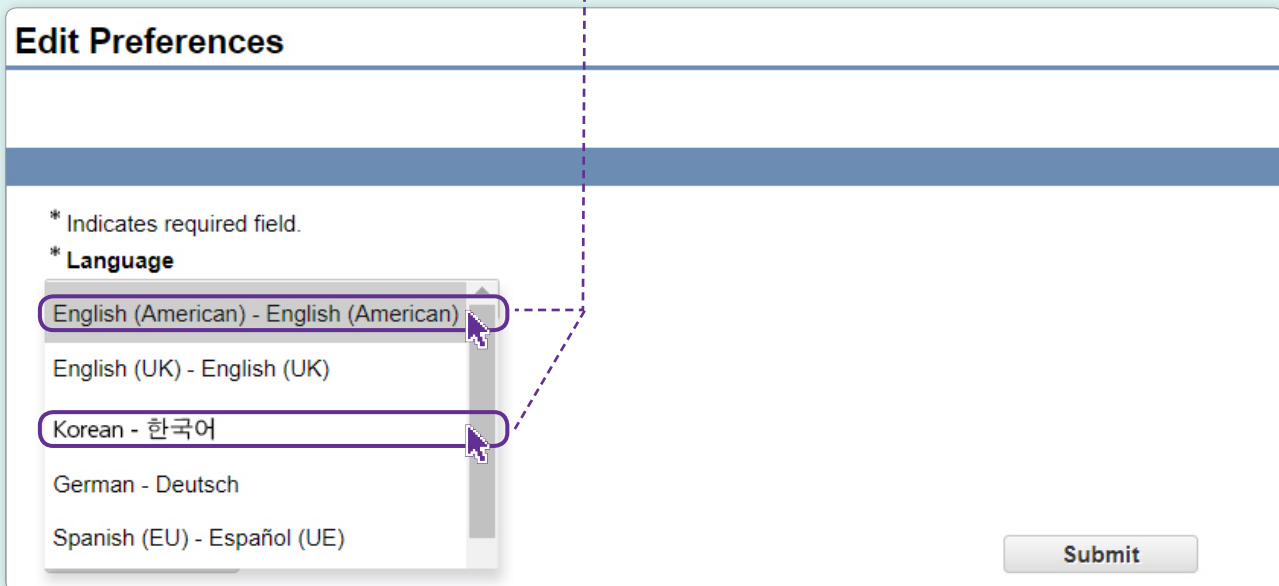

NEW Sharesource를 지금 만나보세요!

새로운 Flag rule의 추가로 보다 다양한 상황에 대한 모니터링이 가능합니다.

● 초기 배액 통과

Sharesource에 입력된 '초기 배액 통과' 설정과 기계의 '초기 배액 통과' 설정이 다른 경우에 플래그가 표시됩니다.

● 장치 프로그램 변동

Sharesource에 입력된 장치 프로그램과 기계의 프로그램이 다른 경우에 플래그가 표시됩니다.

클리닉
보고서
병원 설정
환자 관리
사용자
도움말

병원 설정

장치 템플릿

플래그 규칙

>Homechoice Claria 플래그 규칙

Homechoice Claria

병원에서 설정하고자 하는 플래그 규칙을 선택하십시오. 치료 중에 선택한 플래그 규칙이 선택된 기준을 충족하면, 치료 대시보드에 ! 또는 !! 가 대신 표시됩니다. 플래그 규칙을 설정하는 방법:

1단계: 플래그 규칙의 왼쪽에 있는 상자를 선택하여 해당 규칙을 활성화합니다.
 2단계: 규칙에 대한 설명을 지침으로 사용하여, 대시보드에 ! (우선순위) 및/또는 !! (높은 우선순위) 플래그를 표시할 값을 선택합니다.

참고: 플래그 규칙의 사용 및 선택은 선택 사항이며, 병원의 모든 환자에게 적용됩니다. 플래그 규칙의 변경 사항은 동적이며 과거 치료와 향후 치료에도 적용됩니다.

플래그 규칙	지침	트리거		
			!	!!
치료 기간				
<input checked="" type="checkbox"/> 부족 치료 시간	실제 이간 치료 시간이 선택된 플래그 트리거 값에 의해 프로그래밍된 중 저류 시간보다 짧은 경우, 트리거될 플래그를 설정합니다.		20 분	30 분
치료 변동				
<input checked="" type="checkbox"/> 부족 저류 시간	실제 치료 저류 시간이 선택된 플래그 트리거 값에 의해 프로그래밍된 중 저류 시간보다 작은 경우, 트리거될 플래그를 설정합니다.		30 분	45 분
<input checked="" type="checkbox"/> 부족 치료량	실제 치료량이 선택된 플래그 트리거 값에 의해 프로그래밍된 중 치료량보다 작은 경우, 트리거될 플래그를 설정합니다.		5 %	10 %
<input checked="" type="checkbox"/> 배액 초기 종료	배액이 통과될 때 트리거되도록 플래그를 설정합니다. 통과된 배액 수가 선택된 플래그 트리거 값보다 크거나 같으면 플래그가 표시됩니다.		1	2
<input checked="" type="checkbox"/> 초기 배액 변동	실제 초기 배액량이 선택된 플래그 트리거 값에 의해 프로그래밍된 초기 배액 량과 다른 경우, 트리거될 플래그를 설정합니다.		50 %	100 %
<input checked="" type="checkbox"/> 초기 배액 통과	실제 초기 배액 통과 값이 프로그래밍된 초기 배액 통과 값과 다른 경우 트리거될 플래그를 설정합니다.			
<input checked="" type="checkbox"/> 장치 프로그램 변동	사이클러(기계)의 프로그램이 Sharesource 장치 프로그램과 일치하지 않을 경우 트리거될 플래그를 설정합니다.			
수분 조절				
<input checked="" type="checkbox"/> 과잉 배액	표준 주입 모드에서 배액량이 주간, 이간 또는 최종 주입량의 200% 이상이고, 소량 주입 모드에서 배액량이 주간, 이간 또는 최종 주입량의 180%를 초과하는 경우, 트리거될 플래그를 설정합니다.			
환자 중재				
<input checked="" type="checkbox"/> 주입/저류 통과 횟수	치료의 저류 및/또는 주입 단계 중 발생한 통과 이벤트 수가 선택된 플래그 트리거 값보다 크거나 같은 경우 트리거될 플래그를 설정합니다.		2	4
시스템 알림				
<input checked="" type="checkbox"/> 치료 중 이벤트	치료 중 발생한 이벤트 수가 선택된 플래그 트리거 값보다 크거나 같은 경우 트리거될 플래그를 설정합니다.		5	10

취소
제출

서울시 중로구 중로1 교보생명빌딩 10층 1001호
 Tel: 02. 6262. 7100 Fax: 02. 6272. 7101 www.baxter.co.kr

KO-RCS5-210013